


Comment utiliser ce réglet pour la prise de mesure de l'écart pupillaire?

Avec l'aide d'une autre personne:

- 1- Imprimer et découper le réglet sur sa partie basse en retirant les espaces où se trouvent les deux yeux et où est inscrit le mot "NEZ".
- 2- En étant bien en face, appliquez sur le nez de la personne dont on veut mesurer l'écart, la partie arrondie du réglet.

- 3- Pour l'œil droit: le porteur doit regarder votre œil gauche, vous regardez son œil droit et mesurez en notant la valeur du réglet se trouvant au centre de la pupille (trait rouge).

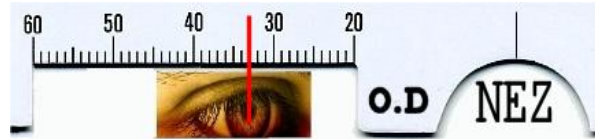

- 4- Pour l'œil Gauche, le porteur doit regarder votre œil droit, vous regardez son œil gauche et mesurez en notant la valeur du réglet se trouvant au centre de la pupille (trait rouge).



- 5- Les écarts peuvent être différents entre œil gauche et œil droit.

NB: Selon la version d'ADOBE Acrobat, vous devez imprimer ce document: avec "aucune" dans "mise à l'échelle" ou bien sans cocher "ajuster à la page"

Cela garantit que les dimensions du réglet seront confirmées à l'original.